




1. Откройте «Dental System Control Panel», нажав на иконку:

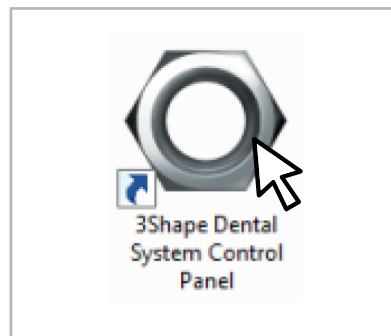


2. В «Dental System Control Panel» нажмите на «**Import/Export**» опцию в категории «Инструменты» :

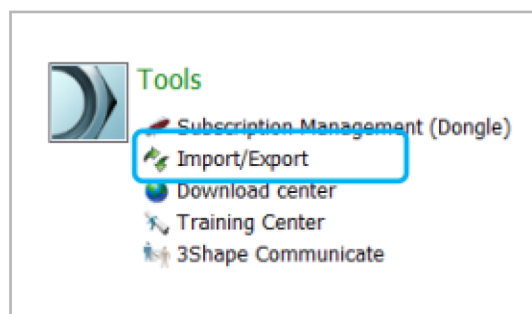


После этого откроется диалоговое окно «**Import/Export**», нажмите на кнопку «**Import materials**» :

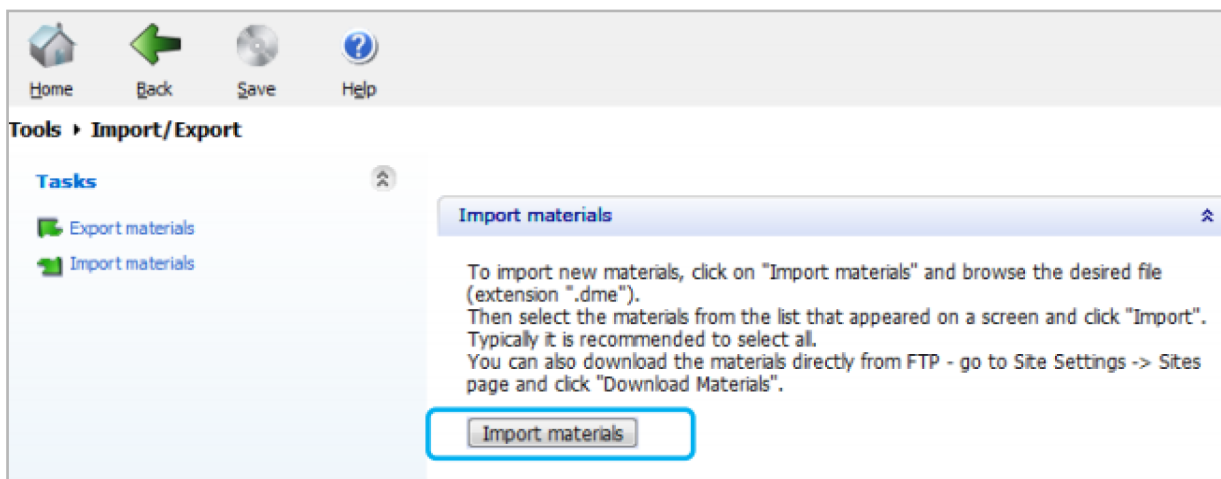

3. В появившемся всплывающем окне выберите файл .DME для импорта:

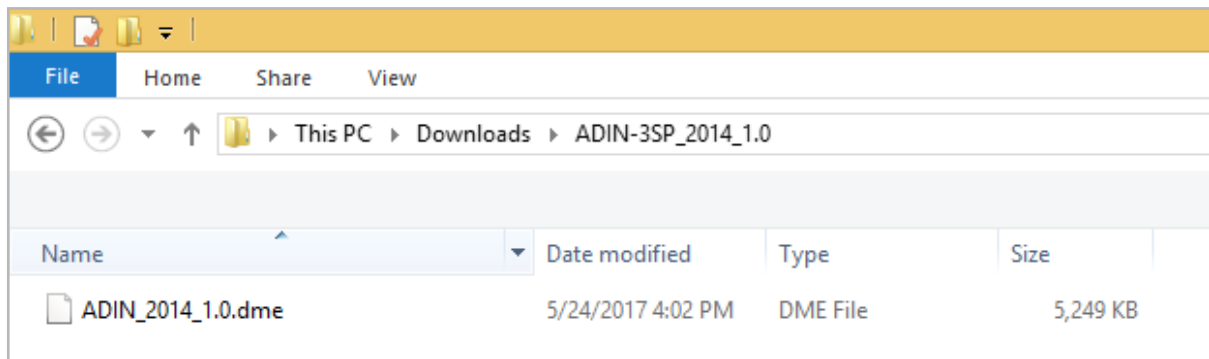


4. Можно выбрать, какие системы имплантатов импортировать, по умолчанию выбраны все. Нажмите **«Import»**, когда будете готовы:

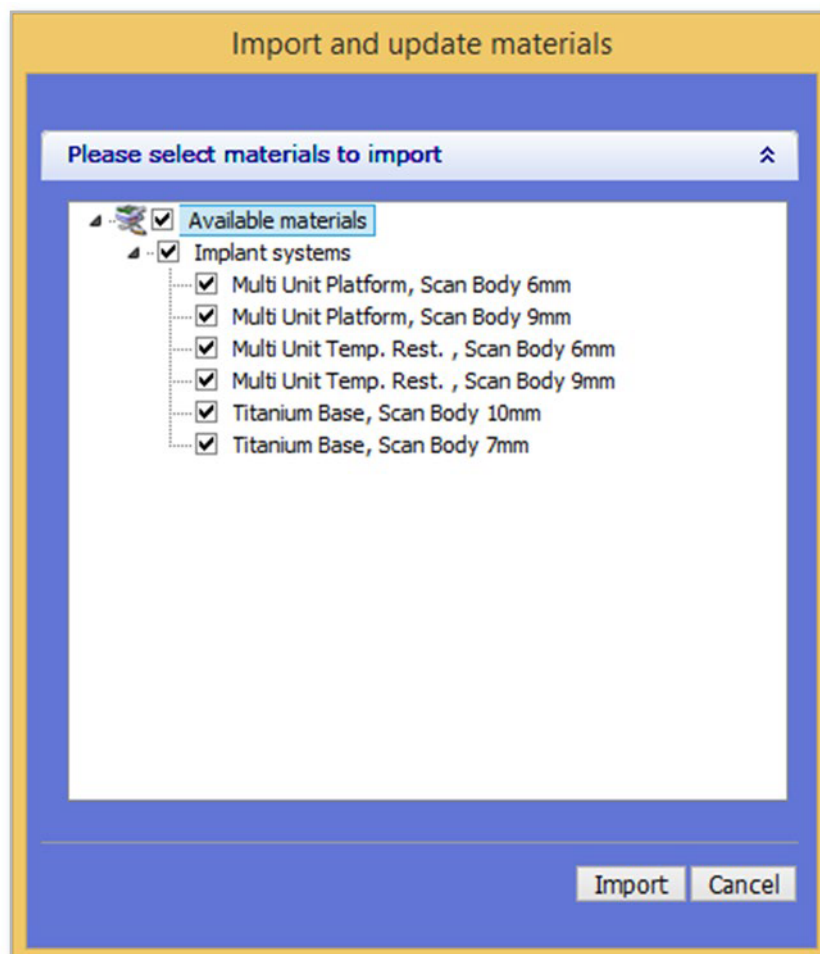

5. Если уже установленные библиотеки имеют тот же файл материала, может появиться всплывающее окно. Следуйте рекомендациям 3shape. Общей рекомендацией является обновление.

После импорта библиотеки появится сообщение:

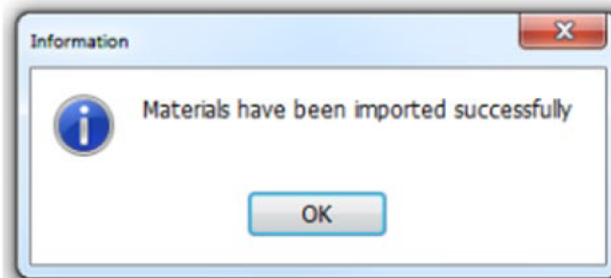

6. Теперь библиотека ADIN успешно установлена и система готова к работе с продуктами ADIN. Повторите шаги для всех библиотек ADIN, которые вы хотите установить. При закрытии программного обеспечения 3shape обязательно подтвердите сохранение, иначе библиотеки не будут сохранены.

