


1. Загрузите последнюю версию CAD-библиотеки Adin Implants для RealGuide с сайта [www.adinrussia.ru](http://www.adinrussia.ru) > <https://adinrussia.ru/instructions/cadcam/>

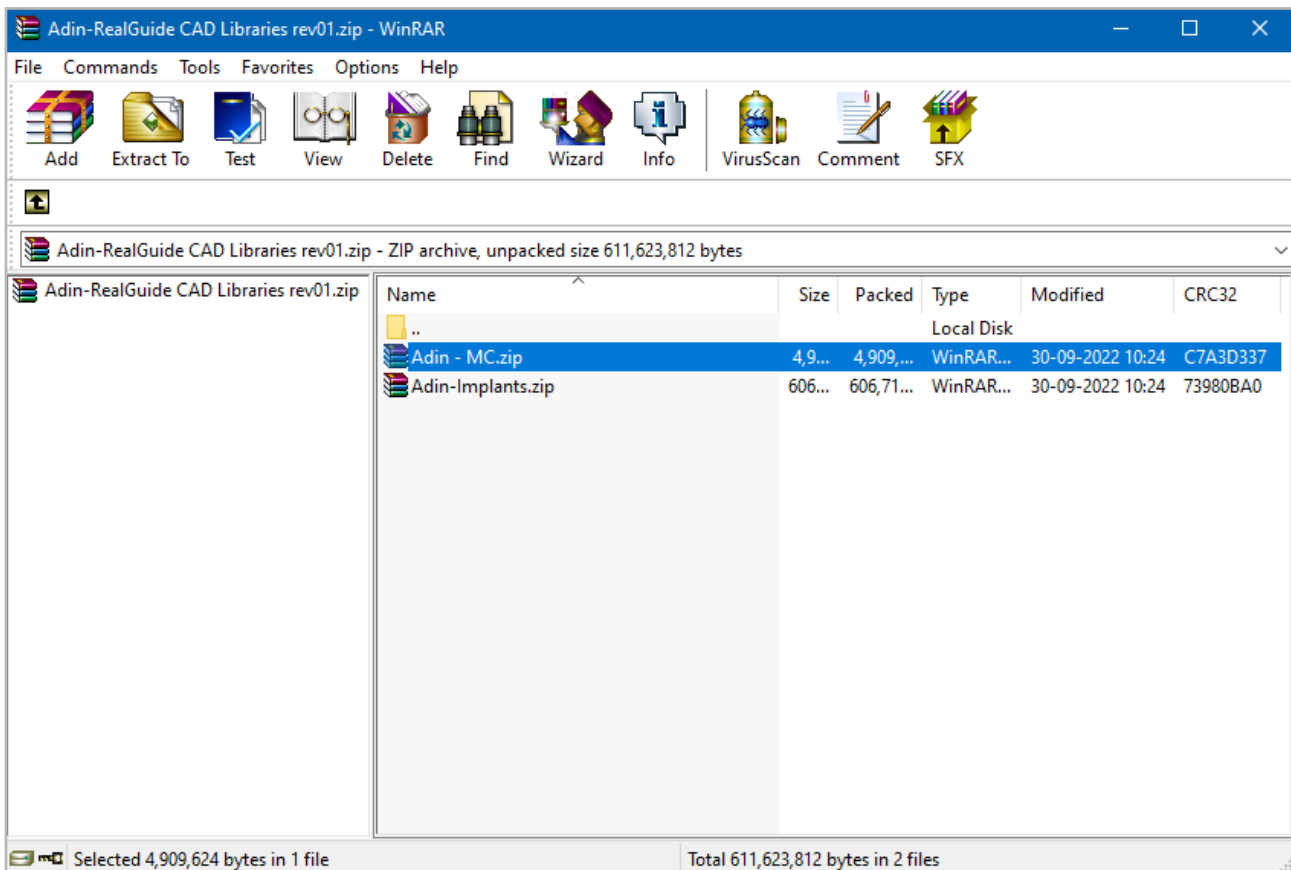


2. Распакуйте zip-файл и сохраните папки библиотеки «implant» и «modelcreator» на локальном диске.
3. Перейдите в папку, в которой на вашем компьютере установлена библиотека RealGuide.

**Пример:** C:\Program Files\RealGUIDE5.0



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед установкой последних библиотек всегда рекомендуется удалить предыдущую версию библиотек Adin CAD, чтобы избежать конфликтов совместимости или дублирования старых и новых библиотек.


4. Создайте новую папку «Library» в каталоге установки RealGuide на вашем компьютере.

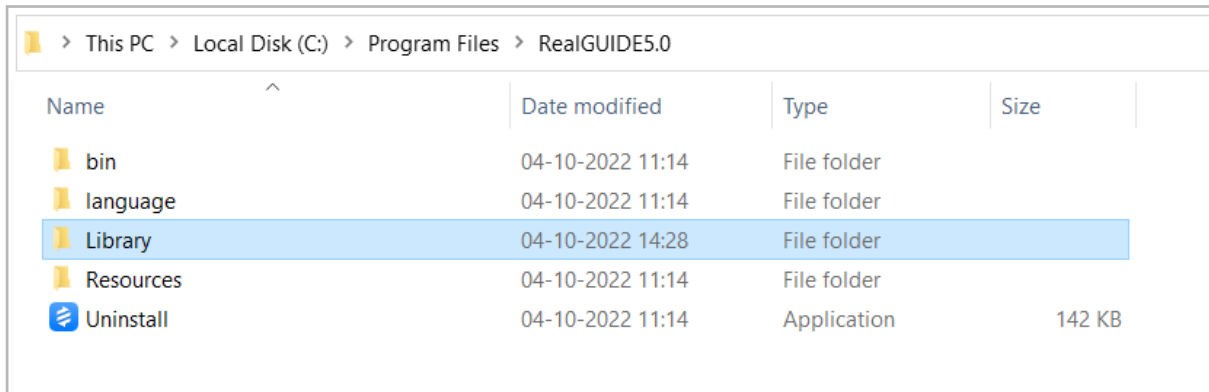

5. Скопируйте и вставьте две распакованные папки «Adin-MC» и «Adin-Implants» в каталог RealGuide на своем компьютере (см. изображение ниже).


**Пример:** `C:\Program Files\RealGUIDE5.0\Library`

6. Папки установленной библиотеки Adin CAD должны выглядеть, как показано на рисунке ниже.

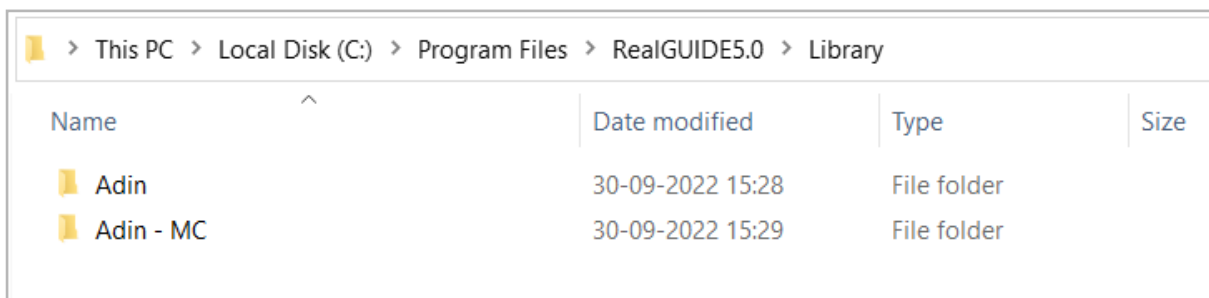


7. Перезапустите программное обеспечение RealGuide, чтобы библиотеки вступили в силу, и выполните дальнейшие шаги с 8 по 11.

8. Чтобы импортировать библиотеку имплантатов, нажмите «set implant library folder».

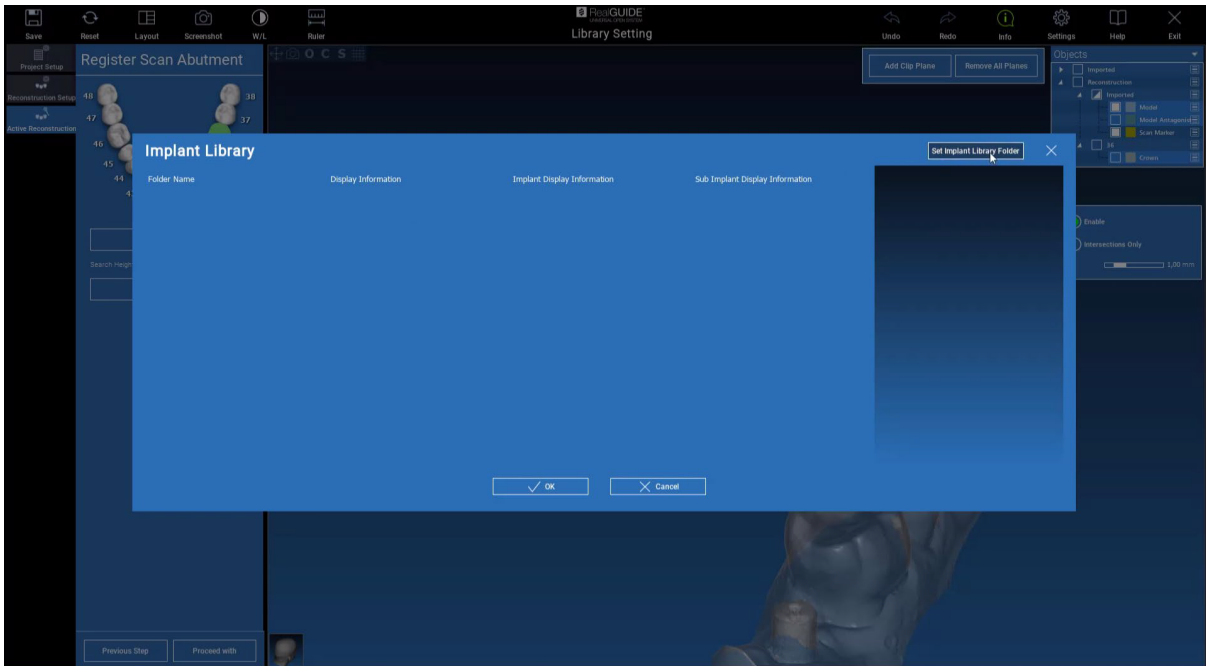

9. Перейдите в папку библиотеки имплантатов и выберите «Adin», который вы вставили на «шаге 5».
10. Чтобы импортировать аналоговую библиотеку, нажмите «select library folder».

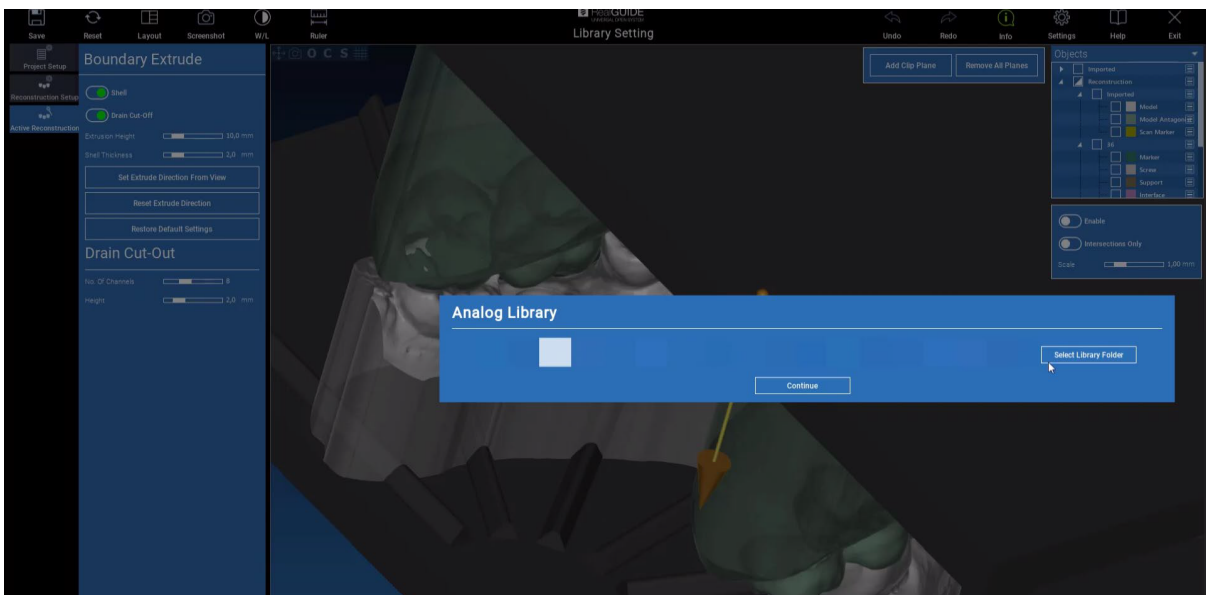

11. Перейдите в папку «implant library» и выберите «Adin – MC», которую вы вставили на «шаге 5».